

Garantia

O Espaçador Bi-valvulado CARETECH Modelo 3607RD e seus acessórios têm 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação a partir da data de compra.

A troca deste produto só poderá ser realizada no ponto de venda no máximo até 7 dias da data de compra comprovados pela nota fiscal. Após este período deverá ser encaminhado ao posto de assistência técnica autorizado pela fábrica.

Excluem se desta Garantia:

Defeitos decorrentes de transporte, quebras resultantes de acidentes e desgaste por uso inadequado (uso comercial e hospitalar).

A Garantia ficará automaticamente anulada caso se comprove que:

• Os defeitos apresentados sejam resultantes de adaptação de peças ou acessórios não originais ao produto.

IMPORTANTE:

- Esta garantia não abrange eventuais despesas com transporte de ida e volta até o posto de assistência técnica e ou fábrica.
 - Cabe ao proprietário do aparelho comprovar o prazo de garantia através da nota fiscal de compra e ou certificado de garantia devidamente preenchido.
- Durante o período de garantia todo e qualquer reparo deverá ser efetuado somente pela rede de assistência técnica autorizada pela fábrica.

Certificado de Garantia

Cliente: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone: _____

Revendedor: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Numero da Nota Fiscal: _____ Data da Emissão: _____

3607RD

Carimbo e Assinatura do Revendedor



Fabricado por:
DORJA - IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICOS LTDA.
Rua Três, 23 - Cond. Westpark Empresarial
Jd. Emicol - ITU - São Paulo - CEP 13312-823
CNPJ: 50.208.271/0001-05 / Fone: 11- 4862-0072
sac@dorja.com.br / www.dorja.com.br
Registro no Ministério da Saúde - 10332170042
Responsável Técnico: Ricardo Nardelli Escobosa
CREA-SP: 0601694023

Distribuído por: Raia Drogasil S.A. CNPJ: 61.585.865/0001-51

Este manual não poderá ser copiado ou usado sem prévia autorização por escrito de Dorja - Ind. e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.

CARETECH
TECNOLOGIA DO CUIDADO COM A SAÚDE E O BEM-ESTAR

Manual de Instruções e Garantia Espaçador Bi-Valvulado Uso Individual

Espaçador Bi-Valvulado (Uso Individual)


► INTRODUÇÃO

Indicado para pacientes com asma e bronquite;
Melhora a técnica de inalação do medicamento spray (bombinha);
Aumenta a deposição pulmonar do medicamento.
O espaçador bi-valvulado CARETECH foi desenhado para ajudar e melhorar a técnica de aplicação de medicamento spray através de inalador dosimetrado (MDI) ou comumente conhecido como "bombinha".


Possui:

- Encaixe universal (compatível com todas as "bombinhas" de mercado)
- Máscara macia e atóxica.
- Válvulas em silicone, unidirecional no bucal.
- Capacidade de 250 ml.


► MODO DE USAR E LIMPAR O ESPAÇADOR:

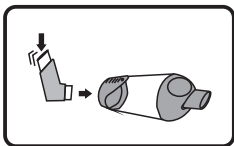


1 - Agite a bombinha e encaixe-a no adaptador do espaçador.

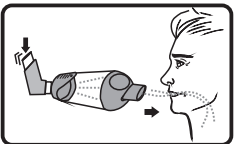


2 - Coloque o bocal do espaçador na sua boca e expire normalmente.
Pressione a bombinha uma vez para liberar uma dose de medicação.
Inspire imediatamente, devagar, pela boca.
Remova o espaçador de sua boca.
Segure a respiração durante 5 a 10 segundos (para melhor a deposição do medicamento).

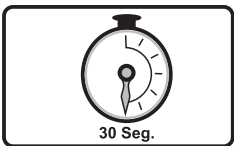


3 - Aguarde 30 segundos.
Se o médico prescreveu mais de uma dose de medicamento, repita as etapas 1 e 2, com uma dose de cada vez.

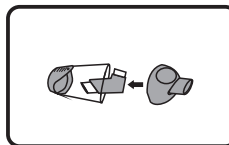


4 - Depois de utilizar, remova a bombinha.
O espaçador foi projetado para guardar a bombinha em seu interior, caso você queira.

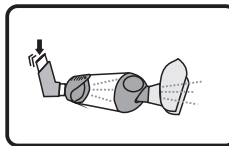

5 - Pode-se adaptar uma máscara ao espaçador.
Peça informações ao seu médico.

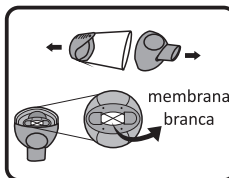

6 - O espaçador deve ser limpo uma vez por semana.
Separe as duas partes - (bocal e corpo).
- A membrana branca não deve ser removida.

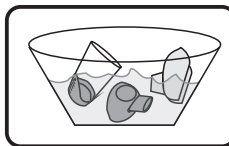

7 - Lave com água morna apenas o corpo, usando detergente suave "neutro".
Passe todas as partes por água limpa, sacuda o excesso de água e deixe secar naturalmente.

- Não seque nem esfregue com pano.
- Não utilize álcool ou abrasivos para limpeza.
- Certifique-se de que todas as partes estejam secas antes de voltar a montá-las. Não guardar as peças se estiverem molhadas ou úmidas.
- Inspeção o espaçador regularmente para assegurar seu bom uso e funcionamento.

► ATENÇÃO ◀

- Leia atentamente as instruções antes do Uso.
- Utilize somente medicamento spray (bombinha) prescrito por seu Médico.
- Utilize o Espaçador conforme prescrição Médica, obedecendo a quantidade de inspirações do medicamento solicitada.
- Crianças ou pessoas acometidas por restrições físicas, sensoriais ou mentais podem utilizar desde que com supervisão de um responsável.